

Instrukcja użytkowania

ICEBED

Rozłóż **ICEBED** na materacu.

Następnie zaściel prześcieradło tak, aby nie spać bezpośrednio na ICEBED.

Uwaga:

- nie należy się zbytnio wychładzać; w razie potrzeby proszę stosować grubsze prześcieradło
- nie należy zamrażać podkładu. Proszę składować w wietrzonym, chłodnym i zacienionym miejscu. IceBed samoczynnie odzyskuje swój chłód.
- można ewentualnie schładzać IceBed za pomocą dmuchawy elektrycznej.

- 1) w przypadku odbywania kuracji leczniczej proszę skonsultować się z lekarzem
- 2) osoby mające trudności z sygnalizowaniem swoich potrzeb, takie jak małe dzieci lub osoby w podeszłym wieku, nie powinny stosować ICEBED
- 3) aby spowolnić zużywanie się żelu należy od czasu do czasu obrócić podkład
- 4) nieregularności powierzchni powstałe w wyniku złożenia/zwinięcia podkładu należy wyrównać rękami
- 5) nie wolno rozcinać ICEBED przy pomocy ostrych narzędzi, takich jak nóż.
- 6) w przypadku uszkodzenia poszycia proszę je zakleić kawałkiem taśmy klejącej
- 7) ICEBED nie nadaje się do prania. Należy go czyścić za pomocą wilgotnej szmatki
- 8) żel wypełniający jest niejadalny
- 9) proszę nie wystawiać ICEBED na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
- 10) poza sezonem użytkowania proszę przechowywać podkład w chłodnym i zacienionym miejscu
- 11) pozbywając się IceBed należy traktować go jako odpad niepalny

Skład poszycia:

Warstwa zewnętrzna: tkanina bawełniana 35%, poliester 65%

Warstwa środkowa: błona polietylenowa

Warstwa wewnętrzna: włóknina poliestrowa 100%

Skład wypełnienia:

woda, polimer absorbujący wodę, gliceryna, konserwanty (wykorzystywane w kosmetykach), preparat przeciwgrzybiczny

WYPRODUKOWANO W JAPONII